

3M Science.
Applied to Life.™



3M Hälsovård

3M Caviion Durable Barrier Cream Barriärkräm



- Förbättrad barriär och återfuktande förmåga
- Kan användas både på intakt och skadad hud
- Fri från parabener & parfym

Caviion Durable Barrier Cream är en koncentrerad, långtidsverkande barriärkräm som skyddar mot kroppsvätskor. Dess unika formel kräver färre appliceringar och mindre kräm vid varje applicerings tillfälle.

Cavilon Durable Cream liknar ingen annan barriärkräm

1. Unik formel med 3M polymerer och dimetikon för förbättrat hudskydd och vårdande ämnen för ökad återfuktning.
2. Evidensbaserad användning: Det finns över 16 dokumenterade kliniska stöd för effekten av Cavilon Durable barrier cream. Du kan därmed vara säker på att du erbjuder evidensbaserad vård.

Användningsområden

- En barriär mot hudirritation av kroppsvätskor
- Förebyggande av hudskador i samband med inkontinens / diarré
- Fuktighetsbevarande vid mycket torr hud
- Skydd av narig och sprucken hud
- Kan användas både på intakt och skadad hud

Varaktig + koncentrerad = Ekonomiskt fördelaktig

Applicering

1. Säker att använda på intakt och skadad hud.
2. Applicera en liten mängd Cavilon Barrier Cream på torr och rengjord hud, smörj in.
3. Applicera ny Cavilon Durable Barrier Cream varannan dag eller efter var tredje hudrengöring.

Fördelar

- Koncentrerad – använd mindre mängd kräm vid varje tillfälle
- Varaktig – står emot upp till tre tvättar
- Försämrar inte absorptionsförmågan i inkontinensmaterial
- PH balanserad – för att bevara hudens normala balans
- Tillför huden fukt och fördröjer avdunstning av vatten från huden
- Mjuktgörande – för att bibehålla en mjuk, slät och elastisk hud
- Erbjuder en hudskyddande barriär som andas – skyddar huden från kontamination
- Går att fästa förband och tejp ovanpå – minskar inte häftämnenas vidhäftande förmåga
- Parfym- och parabenfri



Beställningsinformation			
3M art nr	Storlek	Ant/fp	Fp/lev fp
3392G	92 g/tub	1 tub	12 tuber
3391G	28 g/tub	1 tub	12 tuber
3392GS	2 g/kuvert	20 kuv/fp	12 fp



Tub
92 g



Tub
28 g



Kuvert
2g



3M Hälsovård
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna

Tel 08-92 21 00
Fax 08-92 22 89
Email kundservice@mmm.com
Web www.cavilon.se

För mer information,
besök: www.cavilon.se

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige © 3M 2015.
Alla rättigheter förbehålls. PB53 0006-3 SE 150828