


## 3M™ Cavilon™ hudskyddsprodukter med brett användningsområde

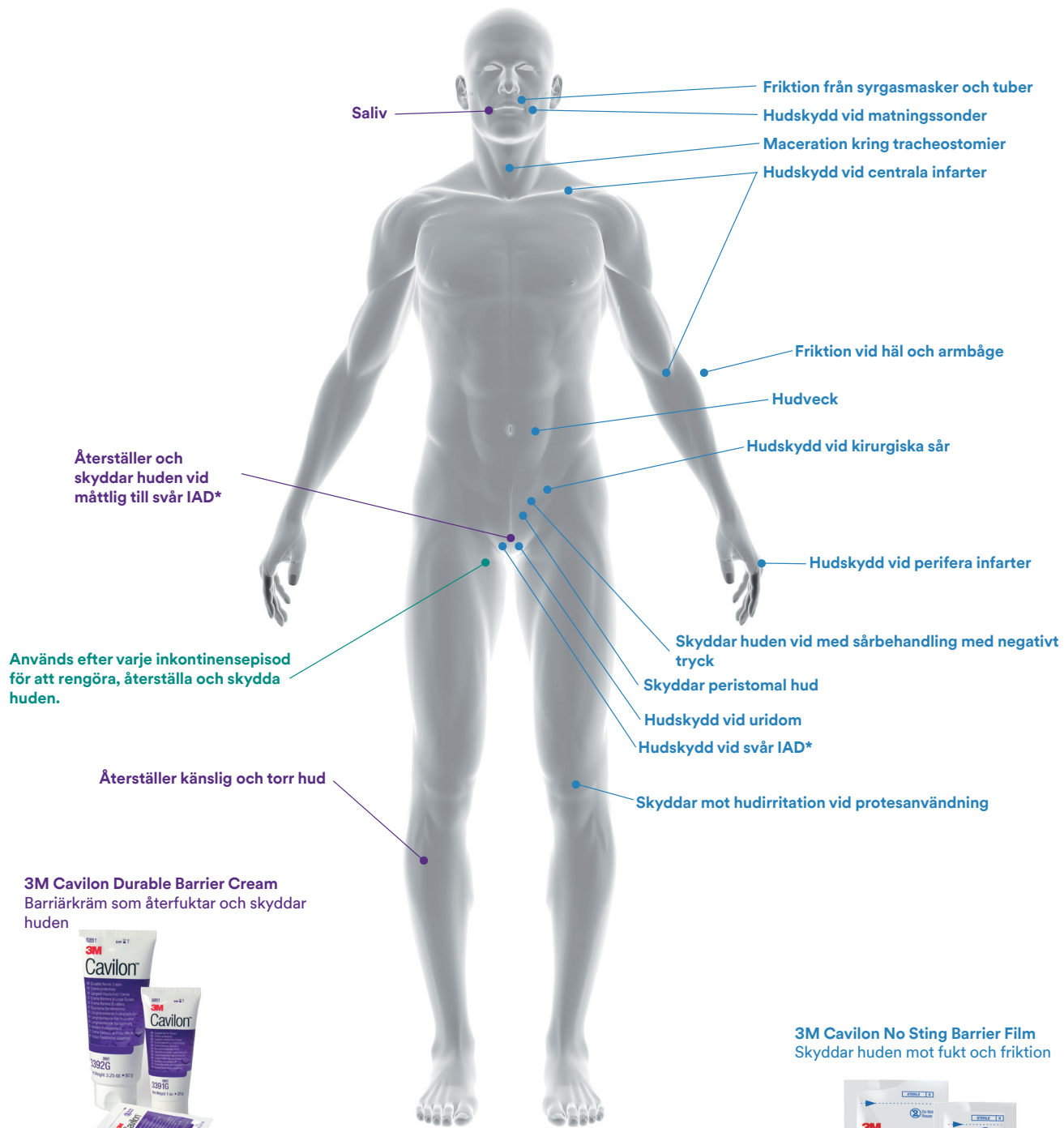

**3M Cavilon Durable Barrier Cream**  
Barriärkräm som återfuktar och skyddar huden



**3M Cavilon Continance Care Wipes**  
Rengör, återställer och skyddar huden. Använd efter varje inkontinens episod för att motverka uppkomsten av IAD\*



**3M Cavilon No Sting Barrier Film**  
Skyddar huden mot fukt och friktion



\* IAD = inkontinensrelaterad dermatit

## 3M™ Cavilon™ Continance Care Wipes

Rengör, återfuktar och skyddar huden efter varje inkontinensepisod

- pH balanserad och hypoallergen
- Snabbtorkande och mjukt material
- Biologiskt nedbrytbar och CE-märkt medicinteknisk produkt

### Applicering:

1. Rengör, återfuktar och skyddar huden vid varje inkontinensepisod.

Art nr	Beskrivning	Storlek	Antal/fp
9274	Continance Care Wipes	20 x 30 cm	8



## 3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream

Barriär mot irritation av kroppsvätskor

- Skydd mot skador i samband med inkontinens
- Återfuktar mycket torr hud
- Kan användas både på skadad och intakt hud

### Applicering

1. Huden skall vara ren och torr innan Cavilon Durable Barrier Cream appliceras.
2. Applicera krämen sparsamt (en ärtas storlek) för att täcka hela det drabbade området. Upprepa vid behov.
3. Om huden känns oljig har för mycket kräm applicerats. Applicering rekommenderas vid var tredje inkontinensepisod.
4. För återfuktning av mycket torr hud, applicera dagligen eller vid behov.

Art nr	Beskrivning	Storlek	Antal/fp
3391G	Durable Barrier Cream	28g/tub	1 tub/fp
3392G	Durable Barrier Cream	92g/tub	1 tub/fp
3392GS	Durable Barrier Cream	2g/kuvert	20 kuvert/fp



## 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film

Primär barriär mot irritation från kroppsvätskor

- Skyddsbarriär mot häftämnen från förband och kirurgiska tejper
- Skydd runt sårkanter mot exsudat
- Skydd mot skador orsakade av friktion

### Applicering

1. Huden ska vara ren och torr innan appliceringen.
2. Applicera en jämn mängd av filmen över hela behandlingsområdet; låt torka (ca 30 sekunder). När spray är lämpligt, håll sprayen med munstycket 10 till 15 cm från huden och applicera en slät, jämn beläggning över hela behandlingsområdet, samtidigt som du rör sprayflaskan i en svepande rörelse. Sprayen är särskilt lämplig när det behandlade området är smärtsamt.
3. Om ett område har missats vid applicering. Låt den första appliceringen torka (cirka 30 sekunder) innan detta område täcks.
4. Om barriärfilmen appliceras på ett område med hudveck eller annan hud-mot-hud kontakt, se till att hudområdena är separerade och låt beläggningen torka innan de återgår till normalläge.
5. Återapplicering rekommenderas var 48-72 timme (vid normal användning) eller oftare vid behov. Vid svår inkontinens, återapplicera var 24 timme.

Art nr	Beskrivning	Storlek	Antal/fp
3343N	Applikatorpinne	1 ml	25 pinnar
3345N	Applikatorpinne	3 ml	25 pinnar
3346N	Sprayflaska	28 ml	1 flaska



3M Svenska AB  
Avd. Hälsovård  
Bollstanäsvägen 3  
191 89 Sollentuna  
Sverige

Tel: 08-92 21 00  
Email: kundservice@mmm.com  
www.Cavilon.se



För mer information besök [www.onemed.se](http://www.onemed.se), eller scanna QR-koden med din smartphone för att besöka OneMed webshop – Cavilon.



3M och Cavilon är varumärken som tillhör 3M Company. Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige. © 3M 2017. Alla rättigheter förbehålles. BR531083-2SE161206