

# SORBACT® MINSKAR MÄNGDEN MIKROORGANISMER I SÅR PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera mängden mikroorganismer. Mikroorganismer binder till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts. Sorbact® underlättar såråkningsprocessen genom att reducera mängden mikroorganismer utan att avge några aktiva ämnen till såret.

## Underlättar såråkning

Förhöjda nivåer av mikroorganismer leder till infektionsrisk och fördröjd såråkning. Sorbact® reducerar mängden mikroorganismer på ett säkert sätt och förbättrar därmed förutsättningarna för såråkning.

## Binder både vanliga mikroorganismer som finns i såret och multiresistenta bakterier

Vanliga mikroorganismer i sår som t.ex. *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus species*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* och *Candida albicans*, binder till Sorbact:s unika yta. Sorbact® binder också MRSA (methicillin-resistent *Staphylococcus aureus*).<sup>1)</sup>

Sorbact® är en svensk innovation och sortimentet av sårförband säljs via ABIGO partners och återförsäljare i mer än 65 länder runtom i världen. I vissa länder säljs Sorbact® som Cutimed® Sorbact® och Leukomed® Sorbact®.

<sup>1</sup> Ronner AC, et al. Adhesion of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* to DACC-coated dressings. *J Wound Care* 2014; 23(10):484, 486-488. <sup>2</sup> Ljungh Å, et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. *J Wound Care* 2006; 15(4):175-180.



## Applicering

Sorbact® appliceras så att dess gröna yta står i direktkontakt med sårbädden.

## Binder

Mikroorganismer binds till förbandet i närvaro av fukt.

## Avlägsnar

Bundna mikroorganismer avlägsnas vid byte av förband.

# SORBACT® SORTIMENT



## SORBACT® GEL DRESSING GELKOMPRESS

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98139	3x15 cm	10	98137	7,5x15 cm	10
98136	7,5x7,5 cm	10			



## SORBACT® COMPRESS KOMPRESS

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98128	4x6 cm	40	98125	7x9 cm	40



## SORBACT® SURGICAL DRESSING KIRURGISKT FÖRBAND

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98140	5x7,2 cm	100	98144	10x25 cm	20
98141	8x10 cm	20	98145	10x30 cm	20
98142	8x15 cm	20	98146	10x35 cm	20
98143	10x20 cm	20			



## SORBACT® FOAM GENTLE BORDER SKUMFÖRBAND MED SILIKONKANT

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98531	7,5x7,5 cm	10	98533	15x15 cm	10
98532	10x10 cm	10			



## SORBACT® RIBBON GAUZE TAMPONAD

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98118	1x50 cm	20	98120	5x200 cm	10
98121	2x50 cm	20	98119	10x200 cm	10



## SORBACT® ROUND SWAB RUNDTORK

Art. nr	Storlek	St/förpackning
98126	Ø 3 cm	70 (5 x 14)



## SORBACT® FOAM DRESSING SKUMFÖRBAND

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98310	10x10 cm	10	98320	10x20 cm	10
98315	15x15 cm	10			



## SORBACT® ABSORPTION DRESSING ABSORPTIONSFÖRBAND

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98224	7x9 cm	20	98223	10 x 20 cm	10
98222	10x10 cm	20			



## SORBACT® SUPERABSORBENT SUPERABSORBERANDE FÖRBAND

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98501	10x10 cm	10	98503	20x20 cm	10
98502	10x20 cm	10	98504	20x30 cm	10



## SORBACT® NPWT WOUND FILLER NPWT SÅRFYLLARE

Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98425	17x28 cm	40	98410	10x100 cm	10



2017-64



ABIGO Medical AB · Ekonomivägen 5 · 436 33 Askim  
Tel: 031-748 49 50 · abigo.se

ANVÄNDARGUIDE

# SORBACT® FÖR ALLA SORTERS SÅR I ALLA STADIER

Det finns Sorbact®-förband för många olika typer av sår. Eftersom Sorbact®-förband inte avger några aktiva ämnen till såret kan det användas redan från början till alla patienter för att förhindra infektion. Förbanden kan också användas för att minska mängden mikroorganismer vid korttids- eller långtidsbehandling av redan infekterade sår.

POSTOPERATIVT		
RENT		
KOLONISERAT / INFEKTERAT		
NEKROTISKT / TORRT FIBRINÖST		
YTTLIGT		
KAVITETER		
FISTLAR		
NPWT		
SVAMPINFEKTION I HUDVECK		

	SORBACT® GEL DRESSING	SORBACT® COMPRESS	SORBACT® SURGICAL DRESSING	SORBACT® RIBBON GAUZE	SORBACT® ROUND SWAB	SORBACT® FOAM DRESSING	SORBACT® FOAM GENTLE BORDER	SORBACT® ABSORPTION DRESSING	SORBACT® SUPER-ABSORBENT	SORBACT® NPWT WOUND FILLER
	☹️ ☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️	☹️ ☹️ ☹️ ☹️
<b>Användningsområde</b>	För torra eller lätt vätskande sår, samt brännskador. Tillför fukt.	För ytliga sår och kaviteter.	För infektionskontroll av kirurgiska och traumasår. Duschsäker baksidesfilm.	För fistlar och svampinfektioner i hudveck.	För kaviteter och rengöring.	För sår med låg till måttlig mängd sårvätska. Semipermeabel baksidesfilm.	För sår med måttlig mängd sårvätska. Semipermeabel baksidesfilm. Vidhäftande kanter med silikon.	För sår med måttlig till riklig mängd sårvätska.	För sår med riklig till mycket riklig mängd sårvätska.	För sårbehandling med negativt tryck.
<b>POSTOPERATIVT</b>			✔️				✔️			
<b>RENT</b>	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	
<b>KOLONISERAT / INFEKTERAT</b>	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	
<b>NEKROTISKT / TORRT FIBRINÖST</b>	✔️									
<b>YTTLIGT</b>	✔️	✔️	✔️	✔️		✔️	✔️	✔️	✔️	
<b>KAVITETER</b>	✔️	✔️		✔️	✔️					
<b>FISTLAR</b>	✔️			✔️						
<b>NPWT</b>										✔️
<b>SVAMPINFEKTION I HUDVECK</b>				✔️						
<b>Bruksanvisning</b>	Applicera hydrogelförbandet direkt på sårområdet (inte på den omgivande huden). Täck med ett lämpligt fuktighetsbevarande sekundärförband.	Applicera direkt på sårytan. För kaviteter: Fluffa upp och placera direkt på kaviteten (undvik att packa för tätt). Täck med ytterligare ett förband.	Ta bort den skyddande filmen. Applicera förbandet över såret och ta försiktigt bort den stabiliserande filmen genom att dra i den blå markeringen.	<b>För fistlar:</b> För in i fisteln och lämna ena änden på fistelns utsida. OBS: Lämna alltid de klippta ändarna utanför såret. <b>För svamp:</b> Applicera ett lager i direktkontakt med den infekterade ytan. Fäst på frisk hud.	Placera rundtorken i kaviteten. Täck med ytterligare ett lämpligt fuktighetsbevarande förband. Rengör enligt era lokala rutiner.	Applicera den gröna sidan direkt på sårytan. Fixera på lämpligt sätt.	Ta bort den skyddande filmen. Applicera förbandet över såret. Välj en storlek där kanterna ligger mot torr hud. Tryck försiktigt längs kanterna.	Applicera den gröna sidan direkt på sårytan. Fixera på lämpligt sätt.	Applicera den gröna sidan direkt på sårytan. Fixera på lämpligt sätt.	Fyll hela kaviteten löst (undvik att packa för tätt).  Fortsätt enligt anvisningarna för det NPWT-system som används.

- ☹️ Torrt
- ☹️ Lätt
- ☹️ Måttligt
- ☹️ Rikligt
- ☹️ Ytligt
- ☹️ Grunt
- ☹️ Grunt + djupt
- 🟡 Infektionsprevention
- 🟡 Fibrinbelagt
- 🟡 Infekterat
- 🟡 Nekrotiskt