

**MENSTROSOR**



# SÅ FUNKAR DET

## TRYGGT - BEKVÄMT - HÅLLBART

MENSTROSOR ÄR ETT ALTERNATIV TILL ENGÅNGSSKYDD SOM BINDOR, TROSSKYDD, TAMPONGER ELLER MENSKOPP. DE KAN ANVÄNDAS I UPP TILL 24H BEROENDE PÅ FLÖDET.

**MER FRIHET & MINDRE KRÅNGEL**



## VÄLJ TROSA UTIFRÅN FLÖDE

TROSORNA FINNS I OLIKA ABSORPTIONSNIVÅ OCH ÄR MÄRKTA MED ETT ANTAL DROPPAR. VÄLJ EN TROSA MED LÄGRE ABSORPTION VID MINDRE FLÖDE & EN TROSA MED HÖGRE ABSORPTION VID KRAFTIGARE FLÖDE.

**TILLGÄNGLIGT HOS ONEMED: MEDEL & SUPERABSORPTION**



## SKÖLJ - TVÄTTA - HÄNGTORKA

EFTER ANVÄNDNING SKÖLJS TROSORNA I KALLT VATTEN, TVÄTTAS I MASKIN, 40 GRADER OCH HÄNGTORKAS. ANVÄND INTE SKÖLJ- ELLER BLEKMEDEL. TROSORNA ÄR TESTADE ATT KLARA MINST 50 TVÄTTAR.

**VARJE TROSA ERSÄTTER >200 ENGÅNGSSKYDD**



## ALLTID HOS COMFYDENCE

- FRIA FRÅN BIOCIDER, PFAS & ANTIBAKTERIELL BEHANDLING
- EKO-BOMULL PÅ INSIDAN
- FUKT- & LUKTSÄKRAD FÖRVARINGSPÅSE

**COMFYDENCE VAR FÖRST UT ATT LANSERA MENSTROSOR I SVERIGE**



VI SVARAR GÄRNA PÅ FRÅGOR VIA MEJL: [HEY@COMFYDENCE.SE](mailto:HEY@COMFYDENCE.SE)  
ELLER TELFON: 08-168400

*Anna & Linda*

